



Los audífonos siempre a punto

Las pilas para audífonos también se pueden encontrar en las farmacias comunitarias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Los audífonos son productos sanitarios que amplifican y procesan sonidos y que están destinados a compensar deficiencias auditivas. Estos productos sanitarios a medida están regulados por el **Real Decreto 1591/2009 de 16 de octubre**.
- Los **productos sanitarios a medida constituyen un grupo especial** ya que están destinados a ser utilizados por un paciente concreto que presenta unas determinadas características.
- Los audífonos requieren de pilas** para obtener la energía necesaria para su funcionamiento.
- Las pilas pueden conseguirse también en farmacias comunitarias.** El farmacéutico comunitario puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los usuarios de productos sanitarios a medida como son los audífonos.



¿Qué tienen que saber los farmacéuticos comunitarios para proporcionar un adecuado servicio?

TIPOS DE PILAS PARA AUDÍFONOS MÁS CONVENCIONALES (analógicos y/o digitales)

Ref. 675



Cartonaje color azul
Son las de mayor tamaño

Ref. 312



Cartonaje color marrón

Ref. 13



Cartonaje color naranja

Ref. 10



Cartonaje color amarillo

Además...

Se presentan normalmente, en envases que contienen 6 pilas, **cubiertas en su parte posterior por un adhesivo** que cubre unos pequeños orificios por los que puede entrar aire a su interior.

Las pilas se activan con el aire que entra en estos orificios. Al quitar el adhesivo, comienza a funcionar la pila. Aunque se vuelvan a tapar los orificios, no se detiene el proceso.

Una vez colocada en el audífono se recomienda **dejar la pila al menos 2 minutos sin el adhesivo** antes de cerrar el portapilas para su correcta activación.

ASESORAMIENTO FARMACÉUTICO EN TORNO A LAS PILAS DE AUDÍFONOS



Tipo de pilas

Preguntar por el tipo de pila del audífono, ya que éstas no son intercambiables.

El color del cartonaje del envase de las pilas puede ser un indicativo, si el usuario no recuerda la referencia exacta.



Fecha de caducidad de la pila

Advertir de la fecha de caducidad, a partir de la cual empieza a deteriorarse.

Es conveniente mantenerla a temperatura ambiente, lejos de la humedad y del calor.



Duración de la pila

Informar de que dependerá de muchos factores, entre otros:

- De las deficiencias auditivas que requieran más energía para funcionar.
- De los sistemas activos que tengan los audífonos.

Ayuda a aumentar la duración de la pila desconectar el audífono cuando no se use, abriendo el compartimento de las pilas



Normativa anticontaminación

Es necesario desechar las pilas agotadas en puntos de recogida autorizados.

La farmacia comunitaria puede ser uno de ellos.

